



## **BRAGA INCONTINENCIA FLEMING VELCRO**

### **DESCRIPCIÓN:**

Braga protectora con material impermeable para impedir el derrame de la orina en las diferentes incontinencias urinarias. Ajustable mediante cierres de contacto.

### **CLASIFICACIÓN:**

Según Real Decreto 1591/2009: Producto sanitario de Clase I.

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Composición:
  - Cuerpo base: PVC 85% y estabilizante y plastificante 15%
  - Ribete: poliéster 100%
  - Goma elástica: poliéster 60% y goma 40%
  - Cierre contacto: poliéster 100%
- Color: Blanco.

### **MODO DE USO:**

Colocar un apósito absorbente en la parte interior de la braga, cuidando que quede sujeto por la doble lámina de la braga. Colocar a modo de pañal y ajustar mediante el velcro.

### **PRECAUCIONES:**

- No usar sobre heridas abiertas.
- No ajustar en exceso.
- En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con un médico.

### **CONSERVACIÓN:**

- Lavar a mano (preferible) o a máquina con jabón neutro y en agua fría o tibia.
- No usar lejía.
- Secar sin retorcer ni estirar.
- Dejar secar alejadas de fuentes de calor.
- Almacenar en lugar seco y fresco.





### PRESENTACIÓN:

TALLAS	CINTURA EN CM.	CN	COD. BARRAS
4	45-60	171987.4	 8 426828 051048
6	60-75	171988.1	 8 426828 051062
8	75-90	171989.8	 8 426828 051086
10	90-100	171990.4	 8 426828 051109
12	100-115	171992.8	 8 426828 051123

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria.



CE



VARISPORT 

Fleming Comercial, S.A.  
Pol. Can Calderón - Avda. Marina, 56 A  
08830 Sant Boi de Llobregat – Barcelona  
Telf.: 934 902 946 – Fax: 934 900 096  
[www.fleming-sa.com](http://www.fleming-sa.com) – [fleming-sa@fleming-sa.com](mailto:fleming-sa@fleming-sa.com)

Uri-con

ALP K2

MEDICAL  
WATCH