

*soporte cervical master
master cervical support*



Referencia	Talla
X-2512-001	Bebé
X-2512-002	Niño
X-2512-003	Junior
X-2512-004	Adulto pequeño
X-2512-005	Adulto mediano
X-2512-006	Adulto grande

TALLAS



LOT

2

REF X-2512

Referencia	Talla	A (cm)
X-2512-001	Niño pequeño	6,5
X-2512-002	Niño mediano	7,5
X-2512-003	junior	9
X-2512-004	Adulto pequeño	10
X-2512-005	Adulto mediano	11,5
X-2512-006	Adulto grande	13,5



Si la medida se encuentra entre dos tallas, escoja la mas pequeña.

INSTRUCCIONES DE USO



Fig. 1



Fig. 2

Escoja la talla adecuada, según la foto y la tabla de las medidas del cuadro superior.

Fig. 1 - doble la estructura del soporte cervical a la altura que usted considere conveniente para el paciente.

Fig. 2 - doble si es necesario las varillas inferiores de la estructura, para que se ajusten correctamente al pecho del paciente. Si fuese necesario puede añadirse un forro como el de la barbilla para la parte de apoyo en el pecho.

Procure que se ajuste adecuadamente en la parte ósea de la mandíbula, intentando dejar libre todas las partes blandas.

INDICACIONES

El collar Master ofrece un apoyo firme de la cabeza al paciente. Ofrece un control de la cabeza para enfermos MS, artritis, ALS/enfermedad de Gehrig, enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, enfermedad de la Neurona Motora, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, distrofias musculares, debilidades en general del cuello por diferentes patologías.

CONTRAINDICACIONES

El soporte cervical Master no es la mejor opción para casos en los que sea necesario una inmovilización del cuello, debida a esguinces moderados, traumatismos u otras lesiones cervicales.

LAVADO

Lávelo con jabón neutro, frotándolo con un paño. Procure secarlo bien antes de volver a usarlo. No acelere el proceso de secado con ninguna fuente de calor.



NO TIENE LÁTEX

ORTOIBERICA S.L.
Parque Tecnológico Asturias parc 1
33428 Llanera
Principado de Asturias (España)
tfno. +34 985794800
Fax. +34 985794810
www.ortoiberica.com
mail: welcome@ortoiberica.es

