

ESPIROMETRO



El ejercitador respiratorio está especialmente diseñado para personas con enfermedades respiratorias o pulmonares.

Los ejercicios respiratorios pueden ser regulados por usted mismo dependiendo de la intensidad del ejercicio que se requiera.

Intensidad suave: 1ª bola arriba;
Intensidad moderada: 1ª y 2ª bola arriba;
Intensidad máxima: 1ª, 2ª y 3ª bola arriba.

Modo de uso:

- Conectar el tubo, con boquilla, a la base del aparato.
- Antes de usar, lavar sólo la boquilla con agua caliente y secar sacudiendo.
- Para un ejercicio suave, inspirar hasta que la primera bola flote y las demás permanezcan en la base.
- Mantener la bola elevada durante 3 segundos. Soltar la boquilla y exhalar el aire.

Precauciones:

- Cada aparato es para uso exclusivo de un mismo paciente.
- Los ejercicios deben de ser siempre supervisados por el médico o terapeuta.
- Antes de cada uso, lavar la boquilla con agua caliente y secar con sacudidas.
- No desechar en el ambiente.
- Seguir las indicaciones del médico o terapeuta.

Características técnicas del ejercitador respiratorio:

- 3 cámaras transparentes
- 3 bolas no tóxicas
- Cada bola corresponde a un nivel de inspiración de 600, 900 y 1.200 c.c., por segundo, respectivamente.
- Material del cuerpo: poliestireno cristal
- Material de las bolas: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- Material del tubo: polietileno de baja intensidad (PEBD)
- Material de la boquilla: polietileno del alta densidad (PEAD)
- Material del filtro: poliuretano

Nos gusta el ejercitador respiratorio por su utilidad.

Por sus resultados observables después de los ejercicios-su polivalencia: Por su capacidad de fortalecer y mejorar el sistema respiratorio-su diseño: Por sus colores divertidos e inspiradores.